

ASPI VENIN

LE PRODUIT :

- Pour soins de 1^{ère} urgence.
- Mini-pompe manuelle avec ventouse pour extraire le venin après morsure de reptiles, poissons ou piqûres d'insectes.
- Petit et léger, se manipule d'une seule main. Réutilisable.

MODE D'EMPLOI :

- Tirer le piston complètement après avoir fixé la ventouse appropriée.
- Placer la ventouse sur la peau. Si la peau est poilue, humecter le bord de la ventouse.
- Placer la pointe du pouce sur le piston et le bout des doigts sous les oreillettes de la pompe.
- Pousser le piston énergiquement et à fond de course sans jamais le lâcher du pouce tant que l'aspiration n'est pas effective.
- Vous noterez immédiatement la puissante aspiration qui élimine venin ou poison. Maintenir 1 à 2 minutes. Plus si nécessaire.
- Pour décompresser, soulever le piston avec la pointe du pouce.

PRESENTATION :

- Sachet minigrip 2 embouts ref 07080
- Coffret avec 4 embouts ref 07081

REMARQUE : Ne pas utiliser sur les endroits sensibles tels paupières ou organes génitaux.



Sano & Pharm France

Zone Industrielle des Forges - 08320 Vireux-Molhain - France

Tél : 03 24 40 80 45 - Fax : 03 24 40 80 46

www.sanoetpharm.fr info@sanoetpharm.fr