

COUSSIN HEMOSTATIQUE


LE PRODUIT :

Dans de nombreux pays de la C.E. l'utilisation du garrot est interdite, seul un médecin peut l'utiliser.

L'utilisation du coussin hémostatique permet de stopper l'écoulement sanguin sans pour autant arrêter la circulation.

APPLICATIONS :

- Hémorragies externes, veineuses ou artérielles.
- Se pose sur toutes les parties du corps (bras, jambe,...).

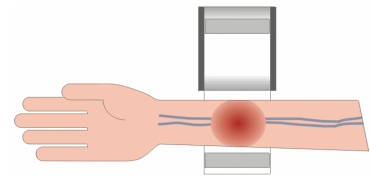

ACTIVITES :

- Sa force de contention remplace le point de compression nécessaire pour toute hémorragie.
- Permet d'éviter la compression manuelle.

MODE D'EMPLOI :

- Poser rapidement le pansement compressif sur la plaie.
- Appliquez le coussin inclus dans sa bande élastique sur le pansement absorbant en appuyant.
- Commencez l'enroulement tout en maintenant la bande extensible tendue (pour conserver la compression) puis fermer la partie velcro.
- Vérifier la sensibilité du pouls.

COMPOSITION :

- Pansement absorbant stérile 20 x 15 cm.
- Tampon en mousse de latex à PH neutre et spongieux.
- Bande élastique de contention avec la partie velcro pour fermer.

PRESENTATION :

Sachet hermétique ref 07010



Sano & Pharm France

Zone Industrielle des Forges - 08320 Vireux-Molhain - France

Tél : 03 24 40 80 45 - Fax : 03 24 40 80 46

www.sanoetpharm.fr

info@sanoetpharm.fr