

SANOGRIP

BANDE ELASTIQUE TISSEE AUTO ADHERENTE

LE PRODUIT :

- Cette bande tissée est utilisée dans le cas de déchirure musculaire ou ligamentaire, grâce à un gaufrage spécial elle immobilise totalement ou partiellement le membre douloureux.
- Celle-ci est également indiquée pour le maintien d'attelles et pour la cryothérapie.

APPLICATIONS :

- Entorse et luxation.
- Protection de pansements
- Maintien de glace et de cold pack,...

PROPRIETES :

- Son élasticité et sa finesse en font une bande très facile à poser.
- Garde ses propriétés cohésives au contact de l'eau, de la graisse et de la poussière.
- Hypoallergénique, ne colle pas à la peau, aux poils et aux pansements
- Se déchire à la main, se lave plusieurs fois.

MODE D'EMPLOI :

- Dérouler 20 cm de bande avant chaque spire.
- Déchirer à la main (ne pas utiliser de ciseaux).
- Pour une parfaite adhésion, terminer la contention sans trop presser l'extrémité du bandage.
- Il est recommandé d'utiliser l'élasticité de la bande avec modération, une tension excessive peut perturber la circulation du sang. En cas de gêne, réduire sans délai la tension appliquée.

COMPOSITION :

- Coton 93.5%, élasthane 6.5%.
- Enduction : latex pulvérisé



Sanogrip 2.5cm x 4m	ref 02002
Sanogrip 5cm x 4m	ref 02005
Sanogrip 7cm x 4m	ref 02007
Sanogrip 10cm x 4m	ref 02010

Sano & Pharm France

Zone Industrielle des Forges - 08320 Vireux-Molhain - France

Tél : 03 24 40 80 45 - Fax : 03 24 40 80 46

www.sanoetpharm.fr

info@sanoetpharm.fr